


お薬を気管支・肺に“直接届ける”を
助けるスパーサー



なぜ吸入がいいの？

全身を巡らず、
患部にピンポイントで届くから負担が少なく、
犬猫思いのやさしい治療のかたちです。

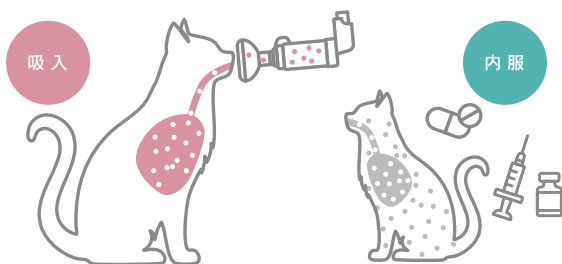

吸入のメリット



少ない量でしっかり効く

経口薬や注射は全身に作用しますが、吸入療法は薬剤を直接、患部（気管支・肺）に届けるため、効率よく効果を発揮します。



長期管理に最適

副作用が少ないため慢性疾患の長期管理に適しています。



体への負担も軽減

必要な場所にだけ作用することで、全身への負担が少なくなります。

仕様

製品名	動物用吸入器アニエア スパーサー (動物用一般医療機器)
製品番号	AS-DL10
耐用期間	1年または1460回
使用環境温度/湿度	1～35℃ / 40～65%RH
保管環境温度/湿度	1～35℃ / 40～65%RH
寸法	本体 52×66×141mm マスク S φ60×47mm (挿入口φ36mm) マスク M φ76×52mm (挿入口φ39mm)
質量	本体 46g マスク S 16g マスク M 24g
付属品	取扱説明書
品質保証	ご購入後1年

製造業登録番号: 2製造療第17号
製造販売業許可番号: 5製販療Ⅱ第201号

製造販売元: 株式会社アステック
茨城県つくば市東新井14-3



お問合せ先

ご注文・お問い合わせは、ペッピーペットまで

PEPPYvet
0120-757-252

動物病院向け医薬品・
医療材ならペッピーペット

スマホ・タブレット対応



【お電話での受付時間】月～金/9:00～17:00

ペッピーペット 検索

右のQRコードからもアクセスできます
<https://www.vetswan.com>



AniAir Spacer

AS-DL10

動物用吸入器 アニエア スパーサー

2サイズ展開 S/M

薬を直接、
気管支・肺に届けるから
少ない量で
しっかり効く

副作用が少なく
体への
負担も軽減

呼吸器の病気の
長期管理に
最適



※本製品に吸入薬(定量噴霧式吸入器:MDI)は付属しておりません。

アニエア スペースーの特長

POINT

3

やさしくフィットするマスク

やわらかいシリコン素材を使用し、マズルにやさしくぴったりフィット。ストレスの少ない快適な使い心地です。

POINT

1

呼吸弁で安心チェック

マスクがマズルにしっかりフィットし、呼吸に合わせて弁が動くことで、呼吸の状態を目で確認できます。

POINT

4

小さな子にもやさしい設計

呼吸の弱い小型のワンちゃんネコちゃんでも吸入しやすい設計。薬剤が逆流しない構造で、安心して使用できます。

POINT

2

静電気をブロック

チャンバー内に薬剤が付着しないよう、帯電防止素材を採用。より多くの薬剤を効率よく吸入できるよう工夫されています。



マスクサイズに対する体重の目安


マスク S

体重
0～4.5kg



マスク M

体重
4.5kg～

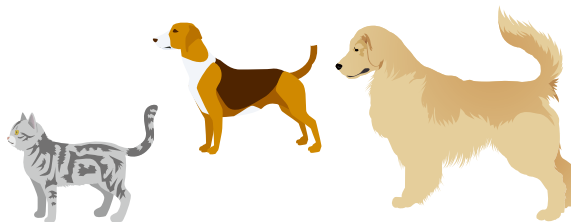

※体重の目安はあくまで参考です。

マスクサイズの選び方


右のサイズガイドを目安にマスクS(直径36mm)とマスクM(直径39mm)の2種類からお選びください。

※サイズガイドは目安にご利用ください。




左の黒い円を正面からマズルに当てた時、鼻と口が覆われますか？

マスク S

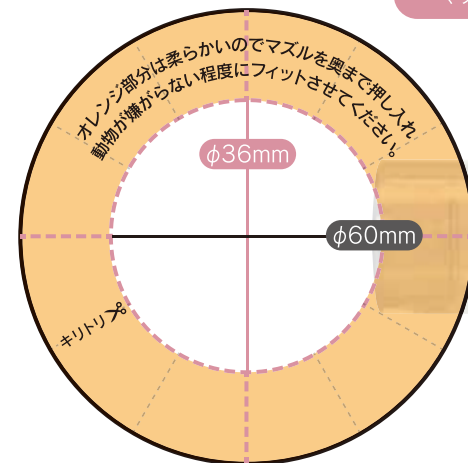

マスク M

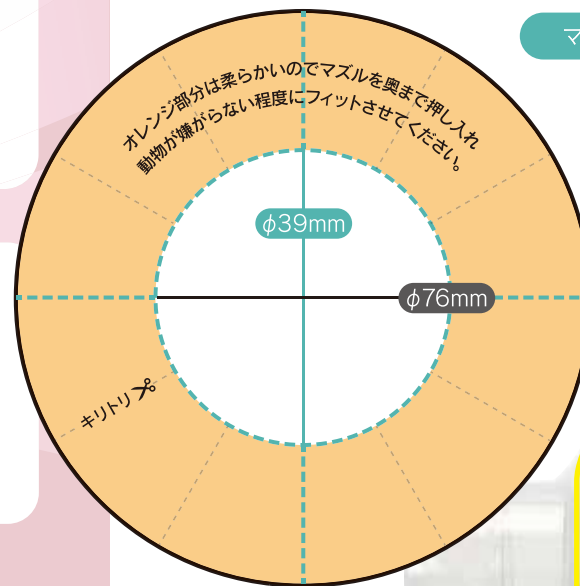

内側の円をくり抜いてマズルにはめていただくとよりわかりやすいです。

使用方法を
動画で
チェック！

