

＼チェックマン[®] NT-proANP／



Q 検体を滴下するためのスポイトは入っていないのですか？

20μLはどのように量り取ればよいですか？

スポイトは付属していません。20μLを量り取れるマイクロピペットをご使用ください。

Q チェックマン[®] NT-proANPの検体の抗凝固剤としてヘパリンも使用可能ですか？

検体としてヘパリン処理血漿を用いた場合、目視判定の発色レベルがEDTA処理血漿よりも低くなったことから、抗凝固処理には必ずEDTAを使用してください。

Q チェックマン[®] NT-proANPで判定に迷うことがありますけどうすれば良いですか？

チェックマンNT-proANPの目的はスクリーニングです。判定に迷うときは「高値」と判断し、心臓病の詳細な検査（胸部X線検査、心エコー図検査）に進んでください。