

ビー・ブラウンエースクラップ クリッパー Isis (アイシス)

<使用毎のお手入れ>

STEP 1

ブラシで毛や汚れを取り除きます。汚れがひどい場合は、アルコールやエタノールに浸した綿棒や布で拭き取って乾燥させてください。

STEP 2

動刃と静刃の間、刃先に注油します。

STEP 3

連続して使用する場合は、10分おきに注意する注油する必要があります。

※刃の内部に毛や獣脂等の汚れが固着すると刃が動かなくなり、さらにモーターに負荷がかかり、バッテリー消耗が早くなります。

※バリカン用の洗浄剤等もご使用可能ですが、本体内部に液体が入らないよう十分にご注意ください。

【重要】修理・消耗を減らすポイント

①アイシスは刃がネジで固定されています。

外す際はネジを完全に抜き取ってから外してください。

無理に外すと内部が破損します。(修理依頼で最も多い事例です)

②アイシスは部分用バリカンです。

広範囲や長毛の毛刈りには向いておりません。

③アイシスは小型で丸い形状のため、落下しやすいです。

強い衝撃には大変弱いので、落下させないようにご注意ください。

(バリカン用の「らっかストッパー」の併用をおすすめいたします)

FIA「らっかストッパー」はこちら >

画像、動画での説明・刃が動かない場合のお手入れと確認方法等は
アイシス特集よりご確認ください。

アイシス特集はこちら >