

装着手順

1



利き手で箱からつまんで取り出します。

2




手袋を利き手からもう一方の手に持ち替えます。

3



持ち替えた後、親指の位置を確認します。

4

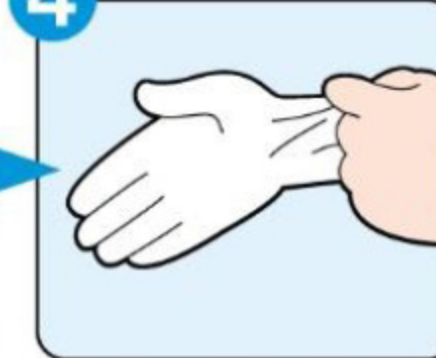

手袋の外側はなるべく何処にも触れないように**利き手**に装着します。

5



装着した手で、箱から手袋を取り出します。

6



もう一方の手に持ち替え、親指の位置を確認し、再び装着済の利き手に持ち替えます。

7



手袋をした手が何処にも触れないように装着します。

脱着手順

1



利き手で一方の手袋の袖口から3~5cm部分をつかみます。

2



手袋をひっくり返し(外側が内側にくるように)抜いていきます。

3



手袋を抜いた後、手袋を利き手の手袋の中で丸めて握ります。

4



汚染した手袋の外側に触れないように、手袋を外した手で利き手の袖口の中に入れ、同様にひっくり返します。

5



利き手の手袋を下に向けて、外していきます。

6



外した後は手袋を廃棄します。

7



最後に**手洗い**を行います。