


使用方法

準備する物：本製品（メンブレンシート、染色液、前処理・脱色液）/ ふた付きの容器 / 生理食塩水等 / 手袋 等

※本製品を取り扱う際は、必ず手袋を着用してください。皮膚のタンパク質が付着しますと検出に影響が出る恐れがございます。


※メンブレンシートの検体採取部位にキズや折れが生じると、検出に支障をきたす恐れがございます。取り扱いにはご注意ください。

※ご使用の際は、ラベル又は箱記載の説明書をよくお読みください。

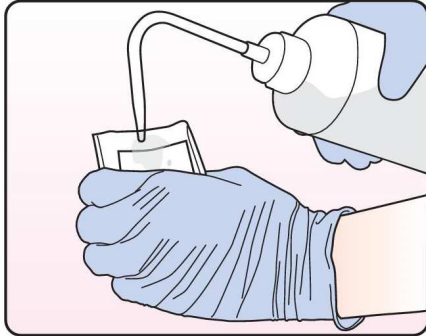


① 創部の洗浄 創部を洗浄します。

② メンブレンシートの湿潤
個包装の封を開けて、フィルム内に生理食塩水等を注ぎ、メンブレンシートを湿らせます。

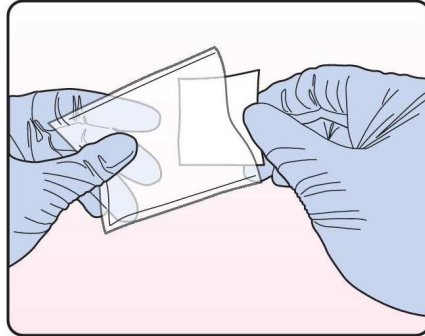


③ メンブレンシートの取り出し
メンブレンシートを取り出します。

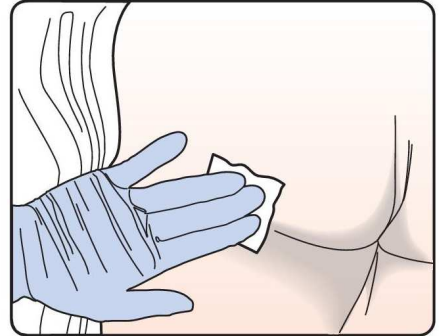


④ 検体採取
洗浄した創部にメンブレンシートを約10秒間密着させます。




⑤ メンブレンシートの前処理
検体採取後のメンブレンシートをトレーに移し、前処理・脱色液をまんべんなく行き渡らせ約30秒間放置します。放置後、余分な液体を廃棄します。

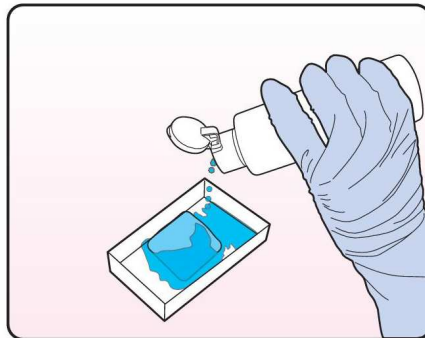


⑥ メンブレンシートの染色
前処理が終わったメンブレンシートに染色液をまんべんなく行き渡らせ約30秒間放置します。放置後、余分な液体を廃棄します。

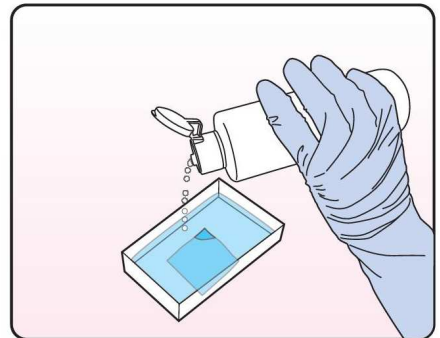

⑦ メンブレンシートの脱色
染色したメンブレンシート上に前処理・脱色液を滴下し、メンブレンシートを液中に浸潤させ、約60秒間放置し脱色します。

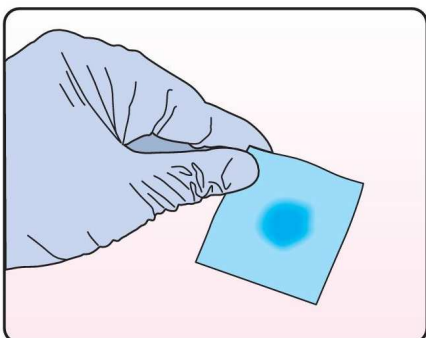

⑧ メンブレンシートの除液・判定
トレーから前処理・脱色液を廃液し、バイオフィルムの有無を確認してください。

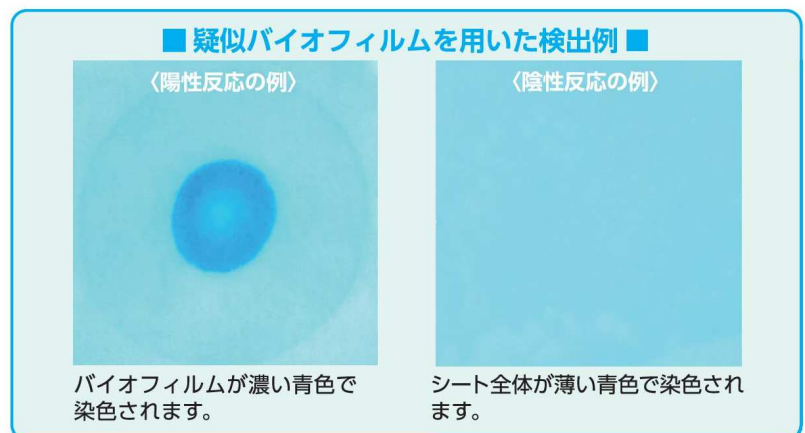

※工程ごとに必要な液量は使用する容器の大きさによりますので、容器に合わせて適切な液量をお使いください。