



Teleflex®

* 2015年5月改訂(第2版 新記載要領に基づく改訂)
2014年5月作成(第1版)

認証番号: 222AFBZX00134000

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用ステープルリムーバ(16787002)
Weckstat スキンステープルリムーバ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状、構造等>

* 本品は、治癒過程が経過し、手術創又は切開部の縁が補助なして結合している場合又はステープルが正しく打針されなかった場合に、ステープルを抜去するために用いるステープルリムーバである。

<各部の名称>

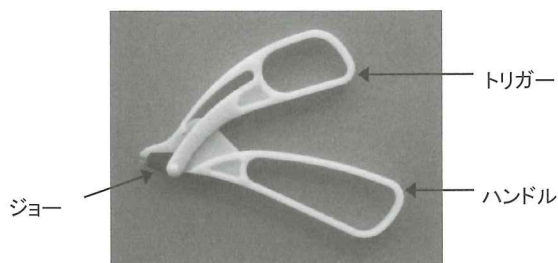

<材質>

ハンドル及びトリガー: ポリアセタール


ジョー: ステンレス鋼(ニッケル、クロム含有)

【使用目的又は効果】

本品は、手術に使用する皮膚ステープルを抜去するために用いる。

【使用方法等】

1. ステープルリムーバの下側のジョーを、ステープルの下に差し込む。

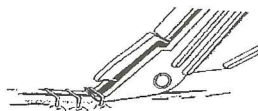

2. ハンドルとトリガーを完全に閉じるまで握り、ステープルを変形させる。
3. 変形したステープルを皮膚から持ち上げ、除去する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

有効期間:

包装上に記載(自己認証データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

テレフレックスメディカルジャパン株式会社

* カスタマーサービス Tel: 0570-055-160

製造業者

テレフレックスメディカル(米国)

Teleflex Medical

Teleflex®